



defibtech

La technologie qui sauve des vies

Défibrillateur de Formation LifeLine DEFIBTECH Semi automatique et Entièrement automatique



Le “**DAE de formation autonome**” est un DAE de formation qui est d’apparence similaire au DAE Defibtech opérationnel, mais possède un contour rouge vif permettant de le différencier clairement comme appareil de formation.

Il ne peut être utilisé pour défibriller les patients.

Une commande à distance est fournie avec le DAE autonome de formation qui permet au formateur de contrôler les exercices de formation et les fonctions à distance du DAE.

La batterie

Avant toute utilisation, la batterie de formation doit être chargée en utilisant le chargeur. La batterie se chargera entièrement en 12 à 14 heures.

DefibFrance SARL

Importateur exclusif Defibtech

63, rue Gambetta

92150 Suresnes

Tél : 01 75 61 04 70

Fax : 01 75 61 04 72

info@defibtech.fr

www.defibtech.fr



defibtech

La technologie qui sauve des vies

Les électrodes

Une paire d'électrodes de formation pour adultes (DDP-101TR) est fournie avec le DAE de formation. Des électrodes de formation sont disponibles en kits complet (assemblage d'électrodes, fils et connecteur) et en électrodes de remplacement économique pour adultes et pour enfants.

Les électrodes de remplacement se fixent (avec crochet et boucle d'attache) aux fils et connecteur réutilisables fournis avec un kit complet d'électrodes.

Les numéros de série pour ces électrodes en option sont: DDP-101TR (set complet d'électrodes pour adultes), DDP-105TR (5 paires d'électrodes de remplacement pour adultes), DDP-201TR (kit complet d'électrodes à usage pédiatrique), DDP-205TR (5 paires d'électrodes de remplacement à usage pédiatrique).

Les scénarios

Les scénarios suivants sont disponibles, aussi bien en mode entièrement automatique qu'en mode semi automatique :

- FV (Fibrillation Ventriculaire) qui se convertit en rythme non-choquable (rythme sinusoïdal normal) après le premier choc. Ce scénario est basé sur le scénario de formation de l'American Heart Association et permet une vue d'ensemble rapide et une démonstration du fonctionnement du DAE.
- Rythme non-choquable continu.
- L'indication "Contrôlez les électrodes" jusqu'à ce que les électrodes soient déconnectées et reconnectées par la suite (afin de simuler le remplacement des électrodes) suivie par une FV qui se convertit après le premier choc en un rythme non-choquable (rythme sinusoïdal normal).
- FV qui se convertit après le second choc en un rythme non-choquable (rythme normal non-sinusoïdal normal).
- FV persistante non-convertible.
- Electrodes non-appliquées au patient. Ce scénario est recommandé comme scénario par défaut en cas d'utilisation de la commande à distance. Le DAE ordonnera à l'étudiant d'appliquer les électrodes sur le mannequin et l'instructeur pourra sélectionner manuellement les simulations de rythmes (telles que RNS et FV) ou tout autre scénario de formation utilisant la commande à distance. 1.2.3.4.5.6.

Dimensions

22 x 30 x 7 cm

Poids

1,7 kg

DefibFrance SARL

Importateur exclusif Defibtech

63, rue Gambetta

92150 Suresnes

Tél : 01 75 61 04 70

Fax : 01 75 61 04 72

info@defibtech.fr

www.defibtech.fr