



# defibtech

La Technologie qui Sauve des Vies



## Le DSA Lifeline **VIEW TRAINER**


(Défibrillateur de formation Lifeline VIEW : DSA / ECG / MANUEL)

Le DAE de formation Lifeline VIEW est un défibrillateur de formation spécifiquement dédié à l'enseignement. Il peut être utilisé en version DSA, ECG ainsi qu'en mode MANUEL.

Les instructions vidéos et vocales permettent un apprentissage efficace et en toute sécurité, aucun choc ne pouvant être délivré. En mode ECG ou MANUEL, le large écran vidéo haute définition permet de facilement visualiser le tracé ECG.

Six scénarios sont préprogrammés en mode DSA, ECG et MANUEL. Vous pouvez également à tout moment simuler des électrodes non connectées, simuler un rythme choquable, des mouvements, ... Un système astucieux de scratch permet de renouveler uniquement la partie adhésive des électrodes, ce qui permet de diviser par cinq le prix des consommables (existe en version pédiatriques/nourrissons).

Le défibrillateur de formation Lifeline est alimenté par une batterie rechargeable sur secteur. Ce système économique permet une utilisation sur plus de 1000 heures. Evolutif dans le temps, le défibrillateur de formation Lifeline se met à jour gratuitement par carte mémoire et sans immobilisation de l'appareil.

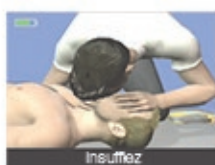

DefibFrance SARL  
Importateur exclusif Defibtech  
63, rue Gambetta  
92150 Suresnes  
Tél : 01 75 61 04 70  
Fax : 01 75 61 04 72  
info@defibtech.fr

[www.defibtech.fr](http://www.defibtech.fr)



# defibtech

## Le DSA Lifeline **VIEW TRAINER**

(Défibrillateur de formation Lifeline VIEW : DSA / ECG / MANUEL)



### Caractéristiques techniques

#### ELEMENTS DU PACK



DAE DE FORMATION



BATTERIE



ELECTRODES ADULTE



TELECOMMANDE



CHARGEUR



MANUEL

Le défibrillateur de formation Lifeline VIEW est livré avec une paire d'électrodes adulte (DDP), une batterie, une télécommande, un chargeur ainsi que le manuel d'utilisateur en français.

Les électrodes de formation sont disponibles en kits complet (DTR-2001 : sachet d'électrodes, fils et connecteur) ainsi qu'en lot de 5 paires d'électrodes de remplacement pour adultes (DDP-2051 : partie adhésive des électrodes).

La batterie est rechargeable sur secteur pour une durée de vie d'environ 200 cycles de charge/décharge, soit plus de 1.000 heures d'utilisation.



#### SCENARIOS

1. Fibrillation Ventriculaire qui se convertit en rythme non-choquable après le premier choc
2. Rythme non-choquable continu
3. Indication "Contrôlez les électrodes" suivie par une FV qui se convertit en rythme non-choquable
4. Fibrillation Ventriculaire qui se convertit après le second choc en un rythme non-choquable
5. Fibrillation Ventriculaire persistante non-convertible
6. Electrodes non-appliquées au patient (scénario recommandé par défaut)

L'instructeur pourra sélectionner manuellement les simulations de rythmes telles que **NSR** : Rythme Non-choquable / **FV** : Fibrillation Ventriculaire / **MOTION** : Mouvement / **PADS** : Mauvais contact des électrodes ou tout autre scénario de formation en utilisant les scénarios de 1 à 6.



#### MODES D'AFFICHAGE

Lors de la mise sous tension, le défibrillateur de formation fonctionne par défaut en « DAE, mode vidéo » qui affiche des invites visuelles durant tous les scénarios d'intervention. Le défibrillateur de formation peut être mis en « DAE, mode ECG » pour obtenir un tracé du rythme cardiaque, ou en « Mode Manuel » pour désactiver les fonctionnalités automatiques de l'appareil.

**DIMENSIONS**  
22 x 30 x 7 cm

**POIDS**  
1,7 kg

**GARANTIE**  
1 an

DefibFrance SARL  
Importateur exclusif Defibtech  
63, rue Gambetta  
92150 Suresnes  
Tél : 01 75 61 04 70  
Fax : 01 75 61 04 72  
info@defibtech.fr

[www.defibtech.fr](http://www.defibtech.fr)